

別紙⑥ 福祉用具の非常時の対応

●電動介護ベッド

会社名	製品名	停電時対応方法
パラマウントベッド 	電動ベッド	台風等による停電が予想される場合の対策 停電時は動作することが出来なくなりますので、事前に「あたま」「あし」を完全に下げ、水平状態をとることを、「かき」につきましては安全のために一番低くすることをお勧めいたします。 また、停電から復旧時にすべての電装品が一斉に動作を始めると故障の原因となることがございます。他の家電製品と同様に、事前に電源プラグをコンセントから抜き、停電からの復旧後、再び電源プラグをコンセントに差し込んで使用ください。各製品の停電時対応方法につきましては左記QRコードより
(株) プラッツ 	電動ベッド	充電式専用バッテリーを搭載しているベッドにつきましては、停電時も一時的に電動機能を使用することが出来ますが、バッテリーがない場合はすべての電動機能が使用できなくなります。 停電時はモーターの取り外しにより、背・ひざ・脚・足底を下げることが可能です。 なお、ケアレットシリーズの1+1モーターにつきましては、9V乾電池を接続することにより手元スイッチの操作で背・ひざ・脚・足底を下げることが可能です。 詳しくは左記QRコードより
シーホネンス(株) 	電動ベッド	停電時にはまず、ベッドの電源プラグをコンセントから抜いてください。 お使いの機種の操作方法を取扱説明書でご確認いただき、必要に応じて、ベッドを水平あるいはそれに近い状態にしてください。 ご利用者様の症状によっては担当医師等にご相談下さい。 停電が復旧しましたら、ベッドの電源プラグをコンセントにさしてください。

●エアマット

会社名	製品名	停電対応期間
(株) ケープ	ビッグセルアイズ ラグーナ、ビッグセルインフィニティ、ネクサスR、トライセルE、ビッグセルEx、ネクサス トライセル アクティ	約7日間
(株) モルテン	オスカー、ステージア、グランデ、アドリン、クレイド、プライムボ、プライムDX・ST、エアサポートスーパージェルマット	オスカー、ステージアは付属の心配なし。 その他 約7日間
パラマウントベッド(株)	こころ結、こころ楽、こころ癒、こころあ	約14日間
(株) タイカ	アルファラビオ、アルファラソ	約7日間

●設置型リフト

(株) モリトー 	介護リフトつるべー	1. 電源プラグを抜いて下さい。 2. ツマミネジを取り外して下さい。（ご利用者様がリフトに乗っている場合は硬い場合があります。） 3. 付属のステンレス棒を貫通穴（黒い樹脂にあります）に差し込んで下さい。 4. 上から見て、右回転で下降、左回転で上昇します。 5. 安全な移乗先に移動して下さい。 取扱い説明書に手動上昇・下降装置の取扱い方法が記載左記QRコードより
明電興産(株)	介護用電動リフト	充電式専用バッテリーを搭載しているリフトにつきましては、バッテリー容量がなくなるまでの間、電動機能を使用することができます。

		バッテリーを満充電していないリフトにつきましては全ての機材の使用できなくなります。 吊上げ状態でリフトが吊上した場合など緊急時非常用降下ボタンを使用して手動で降下することができます。 緊急時の降下方法については取扱説明書をご覧ください。詳しくは販売店またはお近くの問い合わせください。
--	--	---

その他、医療機器(電気式たん吸引器等)においては、取扱い可能店に協力を仰ぐ。